

Philips Avent Babypflege-Set SCH401/00 ab der Geburt in petrol



URL

https://fypsstore.com/produkt/Baby--Kinder/Baby-Ausstattung/Philips-Avent-Babypflege-Set-SCH40100-ab-der-Geburt-in-petrol_566546

Allgemeine Angaben

Zustand:

neu

Produktbild



Beschreibung

Produktdetails: Alter: Ab 0 Monaten Ideales Geschenk für alle frischgebackenen Eltern Nasensauger mit weicher und flexibler Spitze Nagel- und Haarpflegeset Schere mit abgerundeter Spitze Material & Maße: Produktmaße (B x H x T): 117 x 174,5 x 51 mm Im Lieferumfang enthalten: 1 Nagelknipser 1 Nasensauger mit weicher und flexibler Spitze 1 Nagelschere 1 Fingeraufsatz zur Zahnpflege 1 Mini-Kamm 1 Babybürste 1 Aufbewahrungstasche Warn- & Sicherheitshinweise: Warnhinweise: - Verwenden Sie den Nasensauger nie im Mund oder in den Ohren des Kindes. - Richten Sie die Spitze nie direkt in die Mitte des Nasenlochs. - Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es beschädigt ist, da dies zu Verletzungen führen könnte. 1 Nehmen Sie die Verschlusskappe vom Nasensauger ab. 2 Drücken Sie den Saugaufsatz des Nasensaugers zusammen, positionieren Sie die Spitze vorsichtig in ein Nasenloch des Kindes, und neigen Sie die Spitze zur Seite. Seien Sie vorsichtig und führen Sie den Nasensauger nicht zu weit in die Nase des Kindes ein. 3 Lassen Sie den Saugaufsatz langsam los, um Schleim aus der Nase des Kindes zu saugen. 4 Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Nasenloch. Herstellerangaben im Sinne der Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Niederlande kundenservice_dach@philips.com Warn- & Sicherheitshinweise: Warnhinweise: - Verwenden Sie den Nasensauger nie im Mund oder in den Ohren des Kindes. - Richten Sie die Spitze nie direkt in die Mitte des Nasenlochs. - Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es beschädigt ist, da dies zu Verletzungen führen könnte. 1 Nehmen Sie die Verschlusskappe vom Nasensauger ab. 2 Drücken Sie den Saugaufsatz des Nasensaugers zusammen, positionieren Sie die Spitze vorsichtig in ein Nasenloch des Kindes, und neigen Sie die Spitze zur Seite. Seien Sie vorsichtig und führen Sie den Nasensauger nicht zu weit in die Nase des Kindes ein. 3 Lassen Sie den Saugaufsatz langsam los, um Schleim aus der Nase des Kindes zu saugen. 4 Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Nasenloch. Herstellerangaben im Sinne der Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Niederlande kundenservice_dach@philips.com

Details zur Anzeige

Preis 21,99 €
inkl. MwSt.
