

Philips Avent Einzelmilchpumpe elektrisch SCF395/01

URL



 $https://fypsstore.com/produkt/Baby--Kinder/Baby-Ausstattung/Philips-Avent-Einzelmilchpumpe-elektrisch-SCF39501_566551$

Allgemeine Angaben

Zustand:

neu

Produktbild



Beschreibung

Produktdetails: Personalisiert und einfach zu bedienen 8 Stimulationsmodi, 16 Abpumpmodi Der flüsterleise Motor sorgt für entspannte Pumpvorgänge Individuelles Pausieren der Pumpe Einfache Reinigung und Zusammensetzung mit weniger Teilen Mit den Einstellungen des letzten Pumpvorgangs fortfahren Entwickelt für aufrechtes Abpumpen Sanft und bequem: Weiches Silikonkissen bietet Komfort für jeden Körper Schnelleres Abpumpen Die Natural Motion Technologie sorgt für einen schnellen Milchfluss Leistung: Netzspannung: 100 V - 240 V Steckertyp: Micro-USB-Adapter (mit Kabel) Material & Maße: Milchpumpe: BPA-frei Aufbewahrungs- und Pflegehinweis: Einfache Reinigung und Einrichtung Lieferumfang: 1 x Abpump-Utensilien 1 x Motoreinheit (nur mit Kabel verwendbar) 1 x Micro-USB Adapterv(mit Kabel) Warn- & Sicherheitshinweise: Wichtige Sicherheitsinformationen Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch der Milchpumpe aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Warnhinweis -Verwenden Sie die Milchpumpe nicht während der Schwangerschaft, da das Pumpen die Geburt einleiten kann. Warnhinweise zur Vermeidung von Erstickung, Strangulation und Verletzungen: - Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht mit der Motoreinheit, dem Netzstecker, der Verpackung oder den Zubehörteilen spielen. - Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Bewahren Sie die Milchpumpe auf, wenn sie nicht verwendet wird. - Diese Milchpumpe ist nicht für Benutzer (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen geeignet. Diese Personen können diese Milchpumpe nur verwenden, wenn eine angemessene Aufsicht oder entsprechende Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Warnhinweis zur Verhinderung der Übertragung von Infektionskrankheiten: - Wenn Sie eine Mutter sind, die mit Hepatitis B, Hepatitis C oder dem Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) infiziert ist, wird das Abpumpen der Muttermilch das Risiko, das Virus über Ihre Muttermilch an Ihr Baby zu übertragen, nicht verringern oder beseitigen. Warnhinweise zur Vermeidung von Stromschlägen: - Prüfen Sie die Milchpumpe (einschließlich des Adapters) vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung. Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn der Adapter oder der Netzstecker beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder in Wasser getaucht wurde. - Verwenden Sie nur den Adapter (S009AHz050yyyy), der im Lieferumfang der Milchpumpe enthalten ist. -Achten Sie immer darauf, dass sich das Gerät im Störungsfall leicht vom Netz trennen lässt. Der Adapter gilt als Trenneinrichtung. Warnhinweise zur Vermeidung von Verunreinigungen und zur Gewährleistung der erforderlichen Hygiene: - Aus Hygienegründen sollte die Milchpumpe nur von einer einzigen Person verwendet werden. - Reinigen und desinfizieren Sie vor dem ersten und nach jedem Gebrauch alle Teile, die mit der Brust und der Muttermilch in Kontakt kommen. - Verwenden Sie bei der Reinigung der Milchpumpenteile keine antibakteriellen Reiniger oder Scheuermittel, da dies zu Beschädigungen führen kann. - Waschen Sie sich vor dem Anfassen der Brustpumpenteile und Brüste gründlich die Hände mit Wasser und Seife, um Verunreinigungen zu vermeiden. Vermeiden Sie es, die Innenseite der Behälter oder Deckel zu berühren. Warnhinweise zur Vermeidung von schmerzenden Brüsten und Brustwarzen sowie anderen Problemen: -Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn die Silikonmembran Beschädigungen aufweist. Informationen zum Bestellen von Ersatzteilen finden Sie unter Bestellen von Zubehör und Ersatzteilen. - Verwenden Sie

nur das Zubehör und die Teile, die von Philips Avent empfohlen werden, -

Preis 89,99 € inkl. MwSt.

Details zur Anzeige