

Philips Avent Stillset mit elektrischer Einzelmilchpumpe SCD330/31 Premium



URL

https://fypsstore.com/produkt/Baby--Kinder/Baby-Ausstattung/Philips-Avent-Stillset-mit-elektrischer-Einzelmilchpumpe-SCD33031-Premium_566550

Allgemeine Angaben

Zustand:

neu

Produktbild



Beschreibung

Produktdetails: Füttern mit den Philips Avent Flaschen Für naturnahes Trinken Effizientes und bequemes Abpumpen Für einen schnelleren Milchfluss Angenehmeres Erlebnis Personalisiertes Erlebnis, mit 8 + 16 Einstellungsstufen Mit wiederaufladbaren Akkus Sicheres Aufbewahren von Muttermilch Für sicheres Aufbewahren und Transportieren Ultimativer Schutz für deine Muttermilch Natural Motion Technologie Auf deine Bedürfnisse anpassen Tragbare Pumpe Adaptives Silikonkissen Auslaufsichere, stapelbare Becher Sanfte Stimulation Material & Maße: Netzspannung: 100V - 240 V Micro-USB-Adapter (mit Kabel) BPA-frei* Aufbewahrungs- und Pflegehinweis: Einfache Reinigung und Einrichtung Lieferumfang: 1 x elektrische Milchpumpe 24 x Einweg-Stilleinlagen 1 x Babyflasche, 120ml 1 x Babyflasche, 125ml 1 x Babyflasche, 260ml 1 x Sauger, 0m+ 1 x Abpump-Utensilien 1 x Verschlussdeckel 1 x Adapter 1 x Motoreinheit 1 x Micro-USB Adapter 5 x Aufbewahrungsbecher mit Deckel, 180ml 5 x Aufbewahrungsbecher mit Deckel, 240ml 5 x Muttermilchbeutel Warn- & Sicherheitshinweise: Wichtige Sicherheitsinformationen Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch der Milchpumpe aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Warnhinweis -- Diese Milchpumpe ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. -- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Milchpumpe spielen. -- Prüfen Sie die Milchpumpe vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung. Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert. -- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht während der Schwangerschaft, da das Pumpen die Geburt einleiten kann. -- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn Sie sich schläfrig oder müde fühlen. -- Setzen Sie die Milchpumpe keiner extremen Hitze aus, und legen Sie sie nicht in direktes Sonnenlicht. Achtung -- Die Milchpumpe sollte nur von einer einzigen Person verwendet werden. -- Lassen Sie sie nicht fallen, und führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen ein. -- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips Avent empfohlen werden. -- Waschen, spülen und desinfizieren Sie alle Pumpenteile vor jedem Gebrauch. -- Verwenden Sie keine antibakteriellen Reiniger oder Scheuermittel zum Reinigen der Milchpumpenteile. -- Pumpen Sie nicht länger als jeweils fünf Minuten, wenn sich keine Milch abpumpen lässt. Herstellerangaben im Sinne der Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Niederlande kundenservice_dach@philips.com Warn- & Sicherheitshinweise: Wichtige Sicherheitsinformationen Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch der Milchpumpe aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Warnhinweis -- Diese Milchpumpe ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. -- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Milchpumpe spielen. -- Prüfen Sie die Milchpumpe vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung. Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert. -- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht während der Schwangerschaft, da das Pumpen die Geburt einleiten kann. -- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn Sie sich schläfrig oder müde fühlen. -- Setzen Sie die Milchpumpe keiner extremen Hitze aus, und legen

Details zur Anzeige

Preis 167,94 €
inkl. MwSt.
